



1 Encienda su Auto-lectora y espere a que la temperatura se estabilice en 60 °C (la luz de temperatura dejará de parpadear).



2 Retire el hisopo y aplique 2 gotas de humectante en el extremo.



3 Hisope el área más desafiante del instrumento presionando y girando varias veces el hisopo mientras toma la muestra.



4 Coloque el hisopo en el dispositivo PRO1 MICRO y presione con firmeza para empujarlo dentro del cono de lectura.



5 Agite fuertemente hacia abajo por 15 segundos para que el líquido baje al cono de lectura y la solución se vuelva verde.



6 Mueva el hisopo hacia arriba y agite nuevamente para que todo el líquido baje al cono de lectura. Comience la lectura del dispositivo PRO1 MICRO de inmediato.



7 Presione el botón PRO de su Auto-lectora por 3 segundos para activar la posición de lectura. Un bip confirmará la activación.



8 Coloque el dispositivo PRO1 MICRO en la posición de lectura, empuje el lápiz hasta el fondo y asegúrese de que no gire.



9 Empiece el proceso de lectura presionando el botón PRO por 1 segundo. Los LEDs verdes y rojos de la posición empezarán a parpadear.



10 Espere a que la lectura termine (4 minutos); la Auto-lectora emitirá bips 30 segundos antes de mostrar e imprimir el resultado.

Puntos clave para un gran desempeño



No incube el dispositivo PRO1 MICRO más de una vez.



Deje los dispositivos PRO1 MICRO que planea usar a temperatura ambiente por 10 minutos antes de su uso.



Asegúrese de que el material a hisopar esté limpio y seco para evitar interferencias químicas con el producto.




Confirme que el hisopo está adecuadamente humectado antes de realizar el hisopado.



Antes de poner el dispositivo PRO1 MICRO en la auto-lectora asegúrese que:

- El hisopo no esté en el cono
- El líquido en el cono no esté por debajo de la mitad
- El líquido no tiene burbujas
- El líquido no está violeta o gris debido al exceso de proteínas

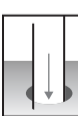

Empuje con firmeza el dispositivo PRO1 MICRO hasta el fondo de la posición antes de iniciar la lectura.



Comience la lectura del dispositivo PRO1 MICRO inmediatamente después de su activación.



Antes del primer uso de su auto-lectora, seleccione el umbral de cuantificación de proteínas adecuado para su proceso: HTM01-01 (Single Threshold) o ISO 15883-5:2021 (Double Threshold). Consulte el manual del usuario para más información.



Consulte las instrucciones de uso que acompañan al producto para un uso seguro y eficaz.

En caso de problemas técnicos

Consulte la sección *Solución de problemas* en el Manual del usuario de su auto-lectora.



MINIPRO



IC10/20FR




IC10/20FRLCD



Otros recursos útiles

Visite nuestro canal de YouTube para ver videos sobre el uso detallado del producto.

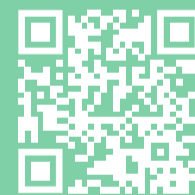

Instagram YouTube Facebook LinkedIn
terragene.com

Soporte local

